

HALIBUT[®] queimaduras

FOLHETO

Características

Bisnaga de 60 ml.

Indicações

Uso cutâneo.

Queimaduras de primeiro ou segundo grau, queimaduras solares e outras feridas não infetadas.

Vermelhidão da pele devido a radioterapia (eritema) ou após terapia laser.

Composição

Água purificada, estearato de etilenoglicol, parafina líquida, pentanodiol, ácido esteárico, cera de parafina, perhidrosqualeno, óleo de abacate, alginato de sódio, trolamina, palmitato de cetilo, sorbato de potássio, perfume de honélia.

Propriedades

A fórmula 2 em 1 de Halibut Queimaduras contribui para a cicatrização das feridas e hidratação da pele. Halibut Queimaduras mantém um ambiente húmido para promover a regeneração da pele.

- Halibut Queimaduras hidrata a ferida
- Halibut Queimaduras drena a ferida

Halibut Queimaduras previne a desidratação e apoia a regeneração da pele graças à sua fórmula adaptada que contém agentes particularmente humectantes e hidratantes, incluindo o óleo de abacate.

Halibut Queimaduras contribui para uma melhor cicatrização.

Halibut Queimaduras é uma emulsão reparadora multifuncional e amiga da pele. Não contém parabenos e pode ser aplicado no rosto e no corpo.

Halibut Queimaduras é adequado para toda a família: bebés, crianças, mulheres grávidas e adultos.

Instruções de utilização

Abertura da bisnaga

Na primeira utilização, perfurar o opérculo da bisnaga com a parte superior da tampa. Halibut Queimaduras é aplicado topicamente diretamente na área a tratar.

- Queimaduras de primeiro grau e queimaduras solares




Aplicar Halibut Queimaduras numa camada espessa e deixar penetrar sem esfregar. Repetir este processo 2-4 vezes por dia.

- Queimaduras de segundo grau e outras feridas não infetadas



Após limpar a queimadura ou a ferida não infetada, aplicar uma camada espessa na zona afetada e repetir as aplicações várias vezes por dia. Cobrir se necessário com uma compressa humedecida, que deve ser mudada todos os dias. Não utilizar um penso absorvente seco.

- Vermelhidão da pele devido a radioterapia e terapia com laser

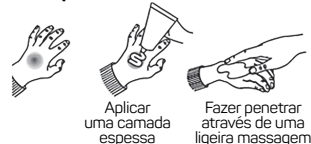

Aplicar 2-3 vezes por dia, de acordo com as recomendações do médico, e massajar suavemente até penetrar na pele.

 **medinfar**
CONSUMER HEALTH

Qualiphar

artwork@qualiphar.com

Warning! We cannot accept responsibility for any errors in this proof after approval. Whilst we take extreme care at all times to ensure accuracy to our client's brief, the final responsibility must be taken by our client.

Sign for approval

Customer	Gifrer	Customer code	POR-LAM-60-MED-NOT/8-10/23	Type	Bijsluiter							
Description	HALIBUT 60 ML PORTUGAL	Article number	30402743-9	Colours	Black							
Width	148 mm	Depth	mm	Height	210 mm	Ø	mm					
Barcode 1		Barcode 2		2D Datamatrix - Serialisation								
Varnish		All over		Varnish free area								
Font 1	Panton regular (body)	Min. size	9 pt	Font 2	Panton regular (codes)	Min. size	6 pt					
Folding box only	Embossing	Braille text		Location								
Label / Foil only	Reel width	mm	Core	mm	Reel	mm	Position					
Leaflet only	Recto-Verso	Yes	Folded	No	Width	mm	Height	mm	Weight	gr	Visual code	Yes
Tube / Can only	Internal coating		Material									
Date	28 nov 2023											

HALIBUT[®] queimaduras

FOLHETO

Precauções de Utilização

Não utilizar:

- Se a ferida estiver a sangrar;
- Se a ferida estiver infetada;

Este dispositivo médico não é um protetor solar.

Não utilizar em caso de hipersensibilidade a qualquer um dos seus componentes.

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar ao abrigo do calor e na caixa de cartão.

Não exceder a data de validade claramente indicada na embalagem e na bisnaga.

Vigilância

Quaisquer incidentes graves resultantes da utilização do dispositivo devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro onde resida o utilizador e/ou o doente.

Data de revisão: 08/2023

CE 0459



Medinfar Consumer Health –
Produtos Farmacêuticos, Lda
Rua Henrique Paiva Couceiro, n°27
Venda Nova, 2700-451 Amadora
Portugal



Gifrer Barbezat
10 Avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin, França

M6010175rev02

POR-LAM-60-MED-NOT/8-10/23

 **medinfar**
CONSUMER HEALTH

30402743-9

Qualiphar

artwork@qualiphar.com

Warning! We cannot accept responsibility for any errors in this proof after approval. Whilst we take extreme care at all times to ensure accuracy to our client's brief, the final responsibility must be taken by our client.

Sign for approval

Customer	Gifrer	Customer code	POR-LAM-60-MED-NOT/8-10/23	Type	Bijsluiter							
Description	HALIBUT 60 ML PORTUGAL	Article number	30402743-9	Colours	Black							
Width	148 mm	Depth	mm	Height	210 mm	Ø	mm					
Barcode 1		Barcode 2		2D Datamatrix - Serialisation								
Varnish		All over		Varnish free area								
Font 1	Panton regular (body)	Min. size	9 pt	Font 2	Panton regular (codes)	Min. size	6 pt					
Folding box only	Embossing	Braille text		Location								
Label / Foil only	Reel width	mm	Core	mm	Reel	mm	Position					
Leaflet only	Recto-Verso	Yes	Folded	No	Width	mm	Height	mm	Weight	gr	Visual code	Yes
Tube / Can only	Internal coating		Material									
Date	28 nov 2023											